

## Triofan® Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico

VERFORA SA

### Dispositivo medico

#### **Che cos'è Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico e quando si usa?**

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è un dispositivo medico che contiene 2% di ectoina, una molecola naturale che protegge le cellule ed aiuta ad alleviare l'infiammazione ed a stabilizzare le membrane.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno può essere usato per il trattamento sintomatico e per la prevenzione della rinite allergica. Sintomi tipici come naso che cola, prurito nasale, congestione nasale e starnuti possono essere efficacemente ridotti.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è una soluzione leggermente ipertonica che protegge dagli effetti nocivi degli allergeni e facilita la rigenerazione della mucosa nasale sensibile.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è privo di conservanti e adatto ai bambini.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è adatto ai nasi sensibili e non ha un effetto di assuefazione.

Il dispositivo medico mostra la stessa efficacia del principio attivo azelastina (sulla base di un TNSS (Total Nasal Symptom Score), valutato dai medici nell'ambito di uno studio clinico).

#### **Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?**

Non sono disponibili dati sulle interazioni tra lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno e altri preparati per uso nasale.

#### **Quando non si può assumere Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico?**

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno non deve essere impiegato in caso di ipersensibilità all'ectoina o ad uno degli altri componenti dello spray nasale.

#### **Quando è richiesta prudenza nell'uso di Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico?**

Se compaiono reazioni allergiche, interrompere immediatamente l'uso dello spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno.

Per assicurare l'igiene, ogni flacone di spray nasale deve essere utilizzato esclusivamente da una persona.

#### **Si può usare Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico durante la gravidanza o l'allattamento?**

Non sono noti rischi per il bambino se lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è usato durante la gravidanza e l'allattamento conformemente alle istruzioni d'uso.

#### **Come usare Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico?**

Usare sempre lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno secondo le presenti istruzioni per l'uso. In caso di dubbi, consulti il suo medico, farmacista o droghista prima dell'uso.

Se non diversamente prescritto dal suo medico, applicare 1-2 spruzzi per ogni narice più volte al giorno. I bambini di 10 anni o di età inferiore devono essere assistiti da una persona adulta durante l'applicazione dello spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno.

Nei bambini sotto i 2 anni al massimo 10 applicazioni (2 nebulizzazioni per narice ad applicazione) al giorno.

A partire dall'età di  $\geq 2$  anni, non ci sono restrizioni di dosaggio.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno non deve essere usato per più di 30 giorni senza interruzione.

Prima di utilizzare lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno per la prima volta, rimuovere il cappuccio protettivo e premere 2-3 volte per rimuovere l'aria dalla pompa erogatrice. Non tagliare la punta. Se la nebulizzazione è insufficiente (il che può accadere se il flacone non è in posizione verticale), premere la pompa erogatrice diverse volte in posizione verticale.

1. Soffiare delicatamente il naso al fine di liberare le narici.
2. Rimuovere il cappuccio protettivo dal flacone.
3. Afferrare il flacone da entrambi i lati con il dito indice e medio e con il pollice al di sotto di esso. Piegare leggermente in avanti il capo e chiudere una narice premendo delicatamente con il dito sul lato del naso.
4. Cominciare ad inspirare delicatamente attraverso la narice.
5. Inserire la punta dello spray nella narice e premere la pompa erogatrice in modo rapido e deciso per nebulizzare all'interno della narice. Continuare a respirare delicatamente attraverso la narice.
6. Inserire la punta dello spray all'interno dell'altra narice.
7. Ripetere i passaggi descritti sopra per l'altra narice.
8. Pulire l'estremità esposta del flacone con una stoffa pulita che non lasci fibre.
9. Reinserire il cappuccio protettivo sul flacone.

#### **Quali effetti collaterali può avere Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico?**

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è ben tollerato. Finora non sono noti effetti indesiderati comparsi in modo regolare o persistenti.

Voglia informare il suo medico, il farmacista, il droghista o il distributore se nota la comparsa di effetti indesiderati associati all'uso dello spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno.

Se i disturbi persistono o peggiorano, contatti il suo medico, il farmacista o il droghista.

#### **Di che altro occorre tener conto?**

La data di scadenza dello spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno è stampata sulla confezione e sul flacone.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno deve essere conservato tra 2 °C e 25 °C.

Lo spray nasale antiallergico Triofan Raffreddore da fieno deve essere tenuto al di fuori della portata dei bambini.

Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato o forato.

Non usare per più di 3 mesi dall'apertura.

#### **Cosa contiene Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico?**

Ectoina 2%, sale marino e acqua.

Uno spruzzo contiene 0,14 ml di soluzione.

#### **Dov'è ottenibile Triofan Raffreddore da fieno spray nasale antiallergico? Quali confezioni sono disponibili?**

Lo spray nasale è disponibile in farmacia e drogheria in confezione da 20 ml di soluzione.

**Importatore**

VERFORA SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

**Fabbricante**

bitop AG, Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Germania.

**Stato dell'informazione**

Novembre 2021.

27399 / 30.03.2022