

## Triomer® Pomata nasale

VERFORA SA

*Dispositivo medico*

### **Che cos'è la pomata nasale Triomer e quando la si usa?**

Con il suo contenuto in sale marino la pomata nasale Triomer è indicata per prevenire e trattare la secchezza della mucosa nasale. Convieni per esempio per le persone che soggiornano in locali climatizzati o surriscaldati. Pune inoltre una barriera meccanica agli allergeni come i pollini, le polveri o i peli di animali, contribuendo in tal modo ad attenuare l'apparizione dei sintomi del raffreddore da fieno o di altre riniti allergiche.

La pomata contiene inoltre dexpantenolo, che svolge un'azione idratante e contribuisce così alla protezione e alla naturale rigenerazione della mucosa nasale.

### **Quando non si può usare la pomata nasale Triomer?**

Non si deve usare Triomer pomata nasale in caso di ipersensibilità (allergia) a uno o più costituenti del prodotto.

### **Si può utilizzare Triomer pomata nasale durante la gravidanza o l'allattamento?**

Triomer pomata nasale può essere utilizzato durante la gravidanza o l'allattamento.

### **Come usare la pomata nasale Triomer?**

*Adulti e bambini a partire dai 3 anni:* a seconda del bisogno, applicare in profondità una piccola quantità di pomata, da 2 a 3 volte al giorno, poi massaggiare leggermente le alette del naso.

### **Quali effetti collaterali può avere la pomata nasale Triomer?**

Nelle persone sensibili un'irritazione locale e rare reazioni d'ipersensibilità a uno dei costituenti sono possibili. Se nota degli effetti secondari è pregato di informarne il suo medico, il suo farmacista o il suo droghista. Gli incidenti considerati gravi verificatisi in relazione all'uso del prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente del suo Paese.

### **Di che cosa occorre tener conto?**

Per ragioni igieniche lo stesso tubo non dovrebbe essere usato da più persone; è anche raccomandato asciugare il puntale applicatore dopo ogni uso e richiudere il tubo correttamente.

Conservare Triomer pomata nasale nel suo imballaggio di origine, a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Triomer pomata nasale non deve essere utilizzato oltre la data indicata sulla confezione (EXP).

### **Che cosa contiene la pomata nasale Triomer?**

*1 g di pomata* contiene 10 mg di sale marino, 10 mg di dexpantenolo, del propilenglicolo e altri eccipienti.

### **Dov'è ottenibile la pomata nasale Triomer? Quali confezioni sono disponibili?**

La pomata nasale Triomer è disponibile in farmacie e drogherie, senza ricetta medica.

In tubetti da 10 g.

### **Fabbricante**

VERFORA SA, Route de Moncor 12, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

### **Stato dell'informazione**

Marzo 2022.

21525 / 15.06.2022